

Anleitung zur Blutentnahme und Probenbearbeitung

Auf Anfrage stellen wir Entnahme- und Versandmaterial zur Verfügung.
Entnehmen Sie das Blut optimalerweise zwischen Montag und Mittwoch.

Vorbereitung des Patienten:

Der Patient sollte mindestens 24 h vor der Blutentnahme keine Vitalstoffpräparate mehr einnehmen. **Mindestens 12 Stunden Nahrungskarenz** sind einzuhalten, keine stark proteinhaltigen Speisen wie Fleisch, Fisch oder Käse am Vorabend der Blutentnahme, keine intensive körperliche Tätigkeit am Tag der Blutentnahme.

Benötigtes Probenmaterial:


- 1 Röhrchen Heparinblut (grünes Röhrchen)
- 2.5 ml Serum zentrifugiert (rotes Röhrchen)
- 1 Urinröhrchen

Durchführung:

1. Punktieren Sie die Vene und füllen Sie das Heparin- und das Serumröhrchen mit Blut.
2. Das Heparin (grünes Röhrchen) muss sofort nach der Abnahme ca. 15x **über Kopf geschwenkt** werden.
3. Das Serumröhrchen (rotes Röhrchen) ca. 10 Minuten zentrifugieren. Danach das Serum abheben und in das Versandgefäss geben.
Wichtig: Der **Zentrifugationsschritt sollte innerhalb einer halben Stunde** nach der Blutentnahme erfolgen.

Urin siehe Rückseite.


Urin:

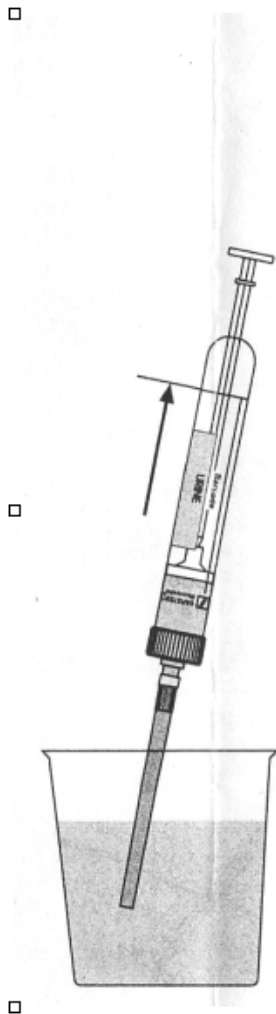

Spitze ins Gefäß eintauchen und die Monovette® bis zur Basis-Linie aufziehen.



Spitze nach oben, Monovette® senkrecht halten und weiter bis zum Anschlag nach unten aufziehen, bis Spitze entleert ist.

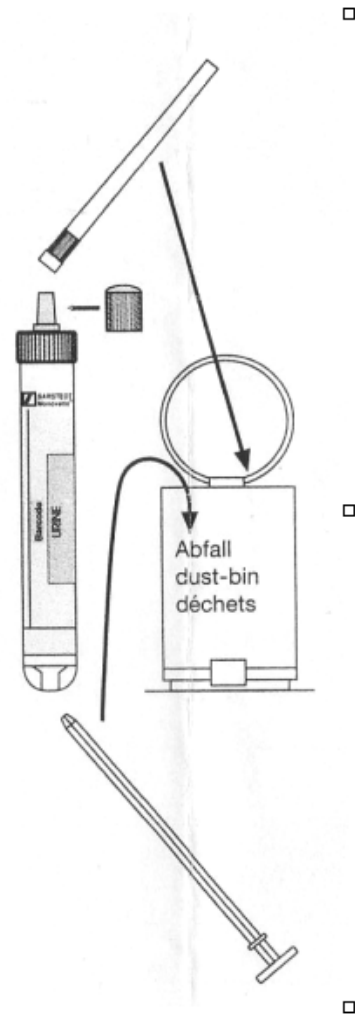

Spitze abziehen, Kolbenstange abknicken, Kappe aufsetzen.

Anleitung zum Probenversand

Versandhülsen und Versandumschlag

Beschriften Sie alle Proben mit dem Namen des Patienten.

Legen Sie die Proben in die **Versandhülse** und senden Sie uns die Proben mit dem ausgefülltem **Anamnesebogen** im adressierten Versandumschlag per **A-Post** (bitte frankieren) zu.

IABC

c/o Purren Apotheke
Martin-Schleyer-Strasse 28
78465 Konstanz

Rufen Sie bitte an, wenn Sie weitere Information benötigen:

Tel: +41 71 666 83 80

Fax: +41 71 666 83 81

Mail: info@iabc.ch

Vielen Dank!